

3M Science.
Applied to Life.™



3M Hälsovård

Cavilon™ No Sting – Hudbarriärfilm

Effektivt och pålitligt hudskydd i upp till 72 timmar



Ett beprövat och kostnadseffektivt val

Cavilon™ No Sting Barriärfilm är en unik terpolymerbaserad, alkoholfri vätskebarriärfilm som när den appliceras på huden snabbt torkar och bildar en transparent, skyddande film. Filmen skyddar intakt eller skadad hud från urin, avföring, övriga kroppsvätskor, häftämnen och friktion i upp till 72¹ timmar.

3M har **över 70 kliniska studier** som stödjer både effektiviteten och kostnadseffektiviteten hos Cavilon™ No Sting Barriärfilm i ett flertal olika kliniska tillämpningar. Detta är betydligt mer än någon annan barriärfilm.

Cavilon No Sting:

- Skyddar skadad och intakt hud
- Tunn och transparent
- Genomsläpplig vattentät barriär
- Alkoholfritt, svider inte²
- Steril, hudvänlig och icke-cytotoxisk³
- Allergivänlig
- Kompatibel med CHG



Starka kliniska bevis

En hälsoekonomisk studie avseende förebyggande av Inkontinens Relaterad Dermatitis (IAD) visar att användning av Cavilon™ No Sting Barriärfilm tre gånger i veckan är lika effektiv för att motverka uppkomsten av IAD som hudbarriärprodukter som måste appliceras efter varje inkontinensepisod.* Samma studie visar också att användandet av Cavilon™ No Sting Barriärfilm tre gånger per vecka för att motverka hudskador ger en signifikant lägre total kostnad än för motsvarande produkter.

* Bliss D, et al. An economic evaluation of four skin damage prevention regimens in nursing home residents with incontinence. Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing. 2007; 34(2): 143-152.

Cavilon™ No Sting Barriärfilm ingår i 3M: S "IAD Care Pathway" ett koncept för att förebygga och behandla IAD.

Hur fungerar Cavilon No Sting?

Cavilon No Sting är en vätska som appliceras på torr och ren hud. Den torkar efter ca 30 sekunder och bildar en tunn, transparent och skyddande barriärfilm på huden.

Barriären är vattentät och tvättas inte bort med tvål och vatten. Cavilon No Sting skyddar effektivt huden mot friktion och irriterande ämnen så som t.ex. faeces, urin, sårsvätska och häftämnen.

Användning:

1. Rengör och torka huden före applicering.

Applikatorpinne: Stryk ut en jämn film över området som ska skyddas.

Cavilon No Sting finns som sterila engångsapplicatorer för exakt applicering av mindre hudområden t.ex. runt sårkanter, stomier, dränage och under häftande material. 1ml täcker ca 10 cm² och 3ml täcker ca 30 cm².



Sprayflaska: Håll flaskan 10-15 cm från huden och spraya över hela hudområdet som ska skyddas med en mjuk, svepande rörelse.

Ger en enkel och kostnadseffektiv applicering av större hudområden, t.ex. hudskydd vid inkontinens. 28 ml ger ca 150 appliceringar per flaska.

2. Låt filmen torka i 30-60 sekunder. Om Cavilon No Sting appliceras i hudveck, håll isär huden tills filmen har torkat.
3. Reapplicering rekommenderas efter varannan till var tredje dag (48-72 timmar) eller oftare vid behov. Om barriärfilmen används under häftande förband rekommenderas reapplicering vid förbandsbyte.
4. Det är inte nödvändigt att avlägsna barriärfilmen, den kommer att försvinna av sig själv efter ca 72h. Den kan avlägsnas med de flesta medicinska häftborttagningsmedel.




Observera

Undvik att använda andra barriärprodukter, salvor eller krämer i kombination med Cavilon No Sting, då den kan avlägsna eller minska produktens effektivitet. Cavilon kan användas på vuxna och spädbarn över 1 månads ålder.

Produkten ska inte användas på infekterad hud, t.ex. svampinfektion. I flytande form är Cavilon No Sting brandfarlig. Håll åtskild från gnistor, flammor och andra antändningskällor. Cavilon No Sting ska inte användas i samband med diatermi eller under diatermiplattor.

Användningsområden

Cavilon No Sting erbjuder ett långtidsverkande hudskydd mot vätskor, fukt och irriterande ämnen och kan användas på både intakt och skadad hud.

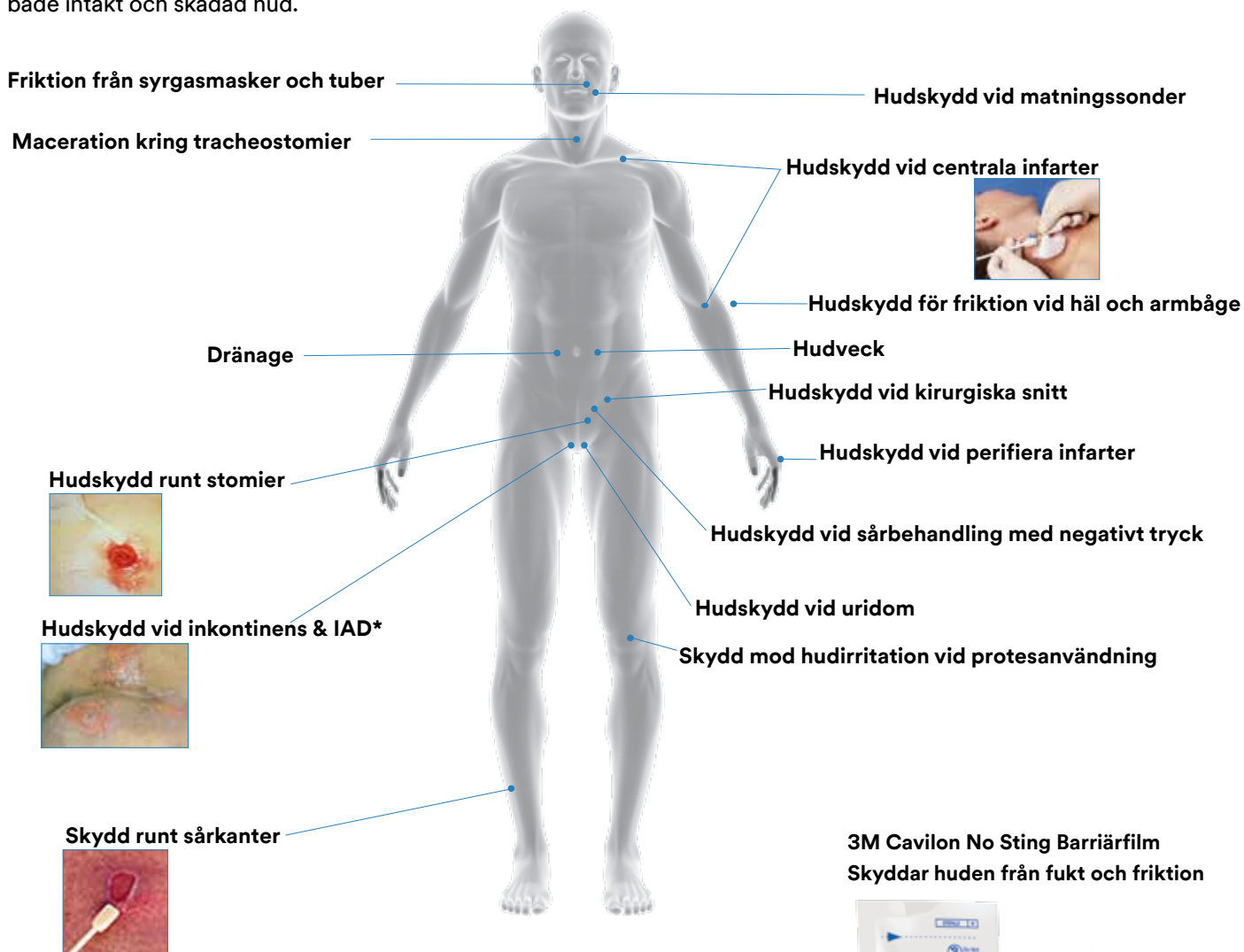

3M Cavilon No Sting Barriärfilm
Skyddar huden från fukt och friktion



3M Art no	Produkt	Ant/fp	Ant fp/lev fp
3343N	1 ml applikator	25	4
3345N	3 ml applikator	25	4
3346N	28 ml sprayflaska	12	1
3346NP	28 ml sprayflaska	1	12

3M Cavilon No Sting Barriärfilm ingår i 3M: S "IAD Care Pathway" ett koncept för att förebygga och behandla IAD. För mer information besök: www.cavilon.se

* IAD = Inkontinens Relaterad Dermatit

1. Kennedy KL, Leighton B, Lutz JB. Cost effectiveness evaluation of a new alcohol free film-forming incontinence skin protectant. Handout from oral presentation at EWMA Conference, Amsterdam, the Netherlands: 1996
2. Grove G.L., Lutz J.B.Schwatzmiller D.H., Measuring Sting Potential of various Film Forming Skin Protectants. 3M Healthcare, St.Paul, USA. 1994.
3. Grove GL. Comparison of the cytotoxicity of alcohol and non-alcohol containing film forming skin protectants. 3M Health Care, St. Paul, USA.



3M Svenska AB

3M Hälsovård
Bollstanäsvägen 3
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 29 100

kundservice@mmm.com www.3M.se/healthcare

©3M 2015. All rights reserved
BR530032-1SE150805